

Māsu izsaukuma sistēma


Lietotāja instrukcija



SCHRACK
S E C O N E T

Ekrāna atslēgšana


Pirms darbības uzsākšanas nepieciešams atbloķēt ekrānu. Lai redzētu aktuālos ,medmāsu, ārstu un personāla izsaukumus ekrāns nav jāatbloķē!

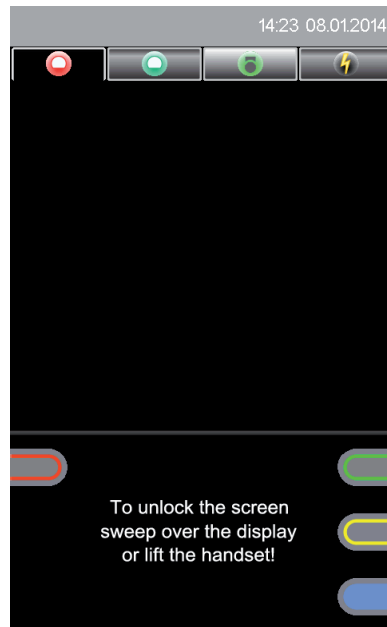

Ekrāna atslēgšanai ir divas iespējas:

- Novelciet pa to ar pirkstu
- Paceliet klausuli

Atslēdzot ekrānu aktivizēsies apakšējā funkciju zona.

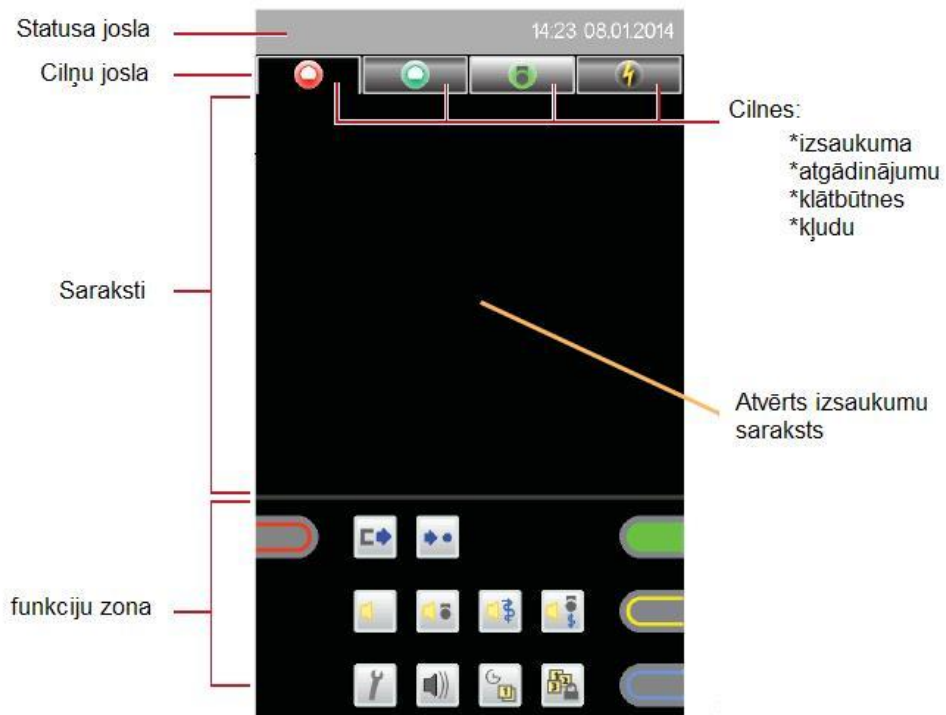

Izsaukumu saraksts

Izsaukumu saraksts pats izvirsīsies priekšā citiem, ja tiks veikts jauns medmāsu, ārsta vai personāla izsaukums. Izsaukumu sarakstā redzami patreiz aktuālie ārstu, medmāsu un personāla izsaukumi











Klātbūtnes saraksts

Lai piekļūtu klātbūtnes sarakstam, jānospiež zaļā atzīmētā poga. (zīmējumā trešā no kreisās) Šajā sarakstā redzams, kurās telpās ārsts, medmāsa vai personāls piespiedis klātbūtnes pogu.




Funkciju zona

Funkcijas zonu ikonu paskaidrojums.

-  Paziņojums medmāsām
-  Paziņojums personālam
-  Vispārējs paziņojums
-  Paziņojums ārstiem
-  Iestatīt laiku un datumu
-  Skaņas iestatījumi
-  Ekrāna iestatījumi
-  Aktivizēt servisa līmeni

Balss savienojums

Balss savienojumu iespējams izveidot uzspiežot tieši uz attiecīgā izsaukuma izsaukumu sarakstā.

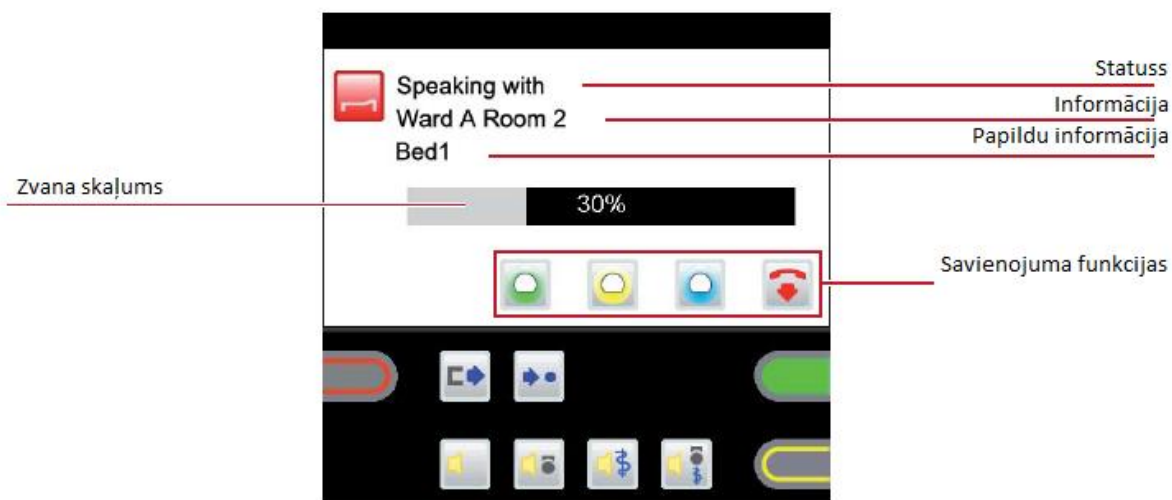

Balss savienojuma funkciju taustiņi.



Pārtraukt balss savienojumu



Uzlikt atgādinājumu medmāsai



Uzlikt atgādinājumu personālam



Uzlikt atgādinājumu ārstam


Izveidot balss savienojumu no telpu saraksta.

Telpu sarakstu iespējams apskatīt divas reizes uzspiežot uz kādas no cilnēm. Piemēram, uz izsaukumu sarakstu cilnes ikonas.

Telpu sarakstā jāuzspiež uz izvēlēto telpu un atvērsies telpas pārskata logs. Lai izveidotu balss savienojumu jāizvēlas attiecīgā gulta no saraksta un notiks balss savienojuma izveide.



KMT MODULIS (palātas komunikāciju terminālis)

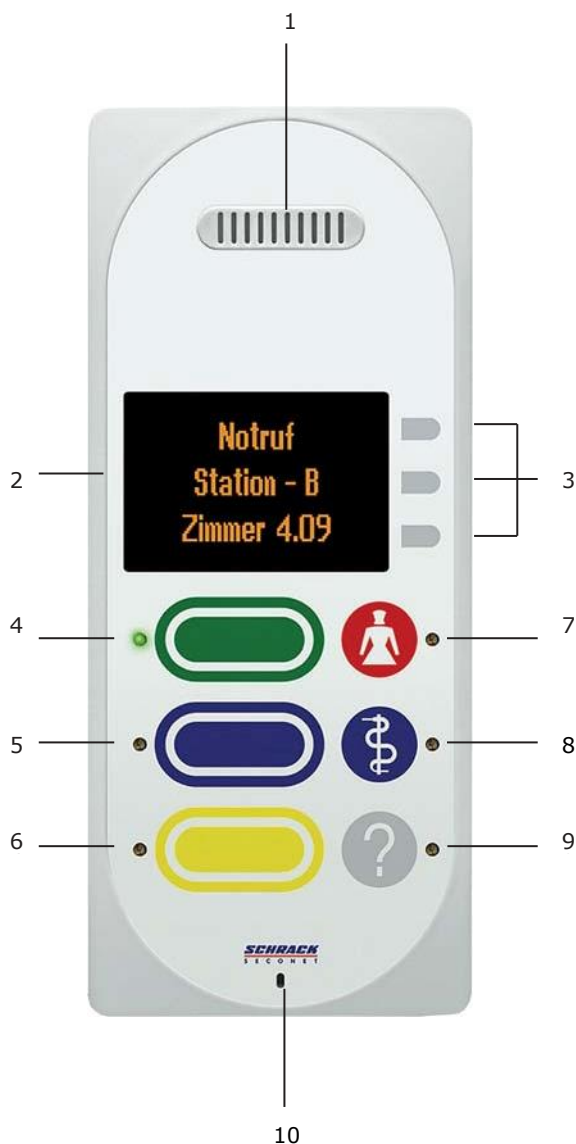

1. Skaļrunis
2. Ekrāns
3. Interaktīvās funkciju pogas
4. Māsas klātbūtnes poga
5. Ārsta klātbūtnes poga
6. Apkalpes personāla – klātbūtnes poga
7. Māsas izsaukuma poga
8. Ārsta izsaukuma un/vai sirds trauksmes poga
9. Vaicājuma taustiņš /Paziņojuma taustiņš
10. Mikrofons

Klātbūtnes atzīmēšana (Komunikāciju terminālis)

Klātbūtnes atzīmēšana notiek ar gaismas signālu, katrai istabai gaitenī un ir redzama uz sakaru termināļa, tajās telpās, kurās darbinieki ir klāt. Uz sakaru termināļiem var tikt atzīmētas trīs klātbūtnes atzīmes:

- Māsas - **zaļa krāsa (4)**
- Palīdzības darbinieki - **dzeltena krāsa(6)**

• Ārsts - zila krāsa(5)

Balss paziņojuma iespējas

Komunikāciju termināļa labajā apakšējā stūrī atrodas paziņojuma taustiņš. Nospiežot un pieturot šo taustiņu runājiņiet mikrafonā un Jūsu paziņojumu dzirdēs māsu postenī un palātās.

Ja nospiežot paziņojuma taustiņu pirms tam būsiet nospiedis attiecīgo klātbūtnes taustiņu, paziņojums tiks novirzīts attiecīgajam personālam.

Skatīt zemāk paskaidrojumu:


- Nospiesta zaļā poga (māsu klātbūtne) un aktivizēts paziņojuma taustiņš - Jūsu paziņojumu dzirdēs māsu postenī un palātā, kurā būs atzīmēta māsas klātbūtne.
- Nospiesta zilā poga (ārsta klātbūtne) un aktivizēts paziņojuma taustiņš - Jūsu paziņojumu dzirdēs ārsta kabinetā un palātā, kurā būs atzīmēta ārsta klātbūtne.
- Nospiesta dzeltenā poga (personāla klātbūtne) un aktivizēts paziņojuma taustiņš - Jūsu paziņojumu dzirdēs personāla telpā un palātā, kurā būs atzīmēta personāla klātbūtne.
- Ja komunikāciju terminālī nav aktivizēta neviena klātbūtne un Jūs veicat paziņojumu, Jūs dzirdēs māsu postenī un visās palātās ar balss komunikāciju iespēju.

Palīdzības izsaukums no gultas


Pacienta palīdzības izsaukums no gultas tiek veikts nospiežot sarkano pogu uz pacienta pulsts. Uz māsu posteņa tiek attēlots gultas nummurs un telpas nummurs. Palātas lampa spīd sarkanā krāsā. Un pacienta pulsts poga sāk spīdēt spožāk. Medmāsai ienākot telpā uz palātas termināļa jāapstiprina sava klātbūtne ar zaļo pogu. Ja māsai nepieciešama palīdzība, tad māsai atkārtoti jānospiež sarkano pogu uz pacienta pulsts. Kad māsa pamet telpu jānospiež zaļā poga, lai zaļā gaisma izdzistu.

Lai veiktu balss savienojumu, pacientam jānospiež sarkanā izsaukuma poga, ja medmāsa māsu postenī pacels klausuli automātiski tiks izveidots balss savienojums ar pacienta pulsti. Pacientam pulsts jānovieto pie auss – gluži kā telefonam.

1. Māsu izsaukuma poga
2. Multimediju taustiņi
3. Virsgaismas un lasīšanas gaismas ieslēgšanas/ izslēgšanas pogas

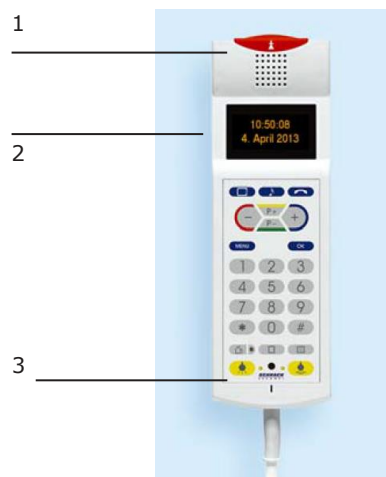

Pacienta pults savienošanas modulis

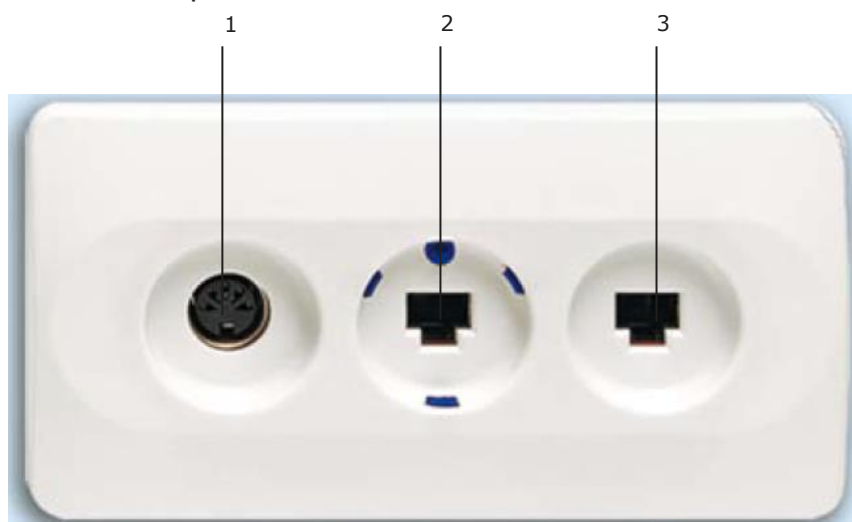

1. Diagnostikas ligzda Izmanto tikai sistēmu apkalpojošais inženieris (5 pin DIN)
2. Pacienta termināļa ligzda (RJ45)
3. Piekļuve internetam izmantojot personīgo portatīvo datoru un kabeli (RJ45)

Pacienta termināļa ligzda (Nr.2) paredzēta pacientu pults pievienošanai.

Signalizācijas lampa gaitenī

Lampa pie palātas uzskatāmi norāda palātā notiekošo.

- Spīd **zaļa gaisma** – māsa atrodas palātā
- Spīd **zila gaisma** – ārsts atrodas palātā
- Spīd **sarkana gaisma** – pacients izsauc māsu
- Spīd **balta** un **sarkana** gaisma – Izsaukums no tualetes
- Spīd **zaļa** gaisma un mirgo **sarkana** gaisma – palātā atrodas māsa un izsauc palīdzību
- Spīd **zaļa** gaisma un mirgo **sarkana** un **balta** gaisma – tualetē atrodas māsa un izsauc palīdzību




Palīdzības izsaukums no gultas

Pacienta palīdzības izsaukums no gultas tiek veikts nospiežot sarkano pogu uz pacienta pults. Uz māsu posteņa tiek attēlots gultas nummurs un telpas nummurs. Palātas lampa spīd sarkanā krāsā. Un pacienta pults poga sāk spīdēt spožāk. Medmāsai ienākot telpā uz palātas termināļa jāapstiprina sava klātbūtne ar zaļo pogu. Ja māsai nepieciešama palīdzība, tad māsai atkārtoti jānospiež sarkano pogu uz pacienta pults. Kad māsa pamet telpu jānospiež zaļā pogu, lai zaļā gaisma izdzistu.

4. Māsu izsaukuma poga
5. Virsgaismas un lasīšanas gaismas ieslēgšanas/ izslēgšanas pogas



Pacienta pults savienošanas modulis

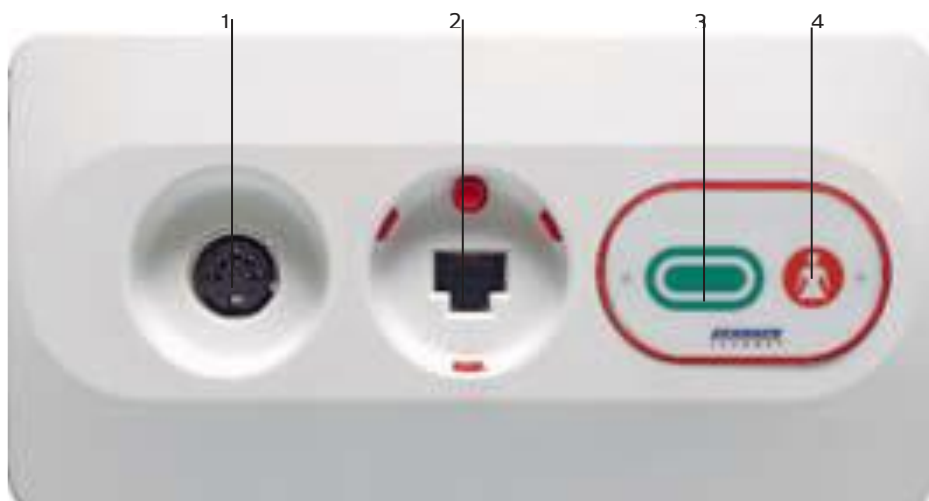


4. Diagnostikas ligzda. to Izmanto tikai sistēmu apkalpojošais inženieris (5 pin DIN)
5. Pacienta pults ligzda (RJ45)
6. Māsu klātbūtnes/apstiprinājuma poga*
7. Māsu izsaukuma poga*

Pacienta termināļa ligzda (Nr.2) paredzēta pacientu pults pievienošanai. Lai izsauktu māsu, jānospiež poga Nr.4. Nospiežot pogu, iedegās sarkana indikatora lampiņa blakus pogai.

Māsai ierodoties pie pacienta jānospiež poga Nr.3. Nospiežot pogu, iedegās zaļa indikatora lampiņa blakus pogai.

*Pults savienošanas modulis iespējams bez 3. Un 4. Pogām.

Komunikāciju terminālis palātā

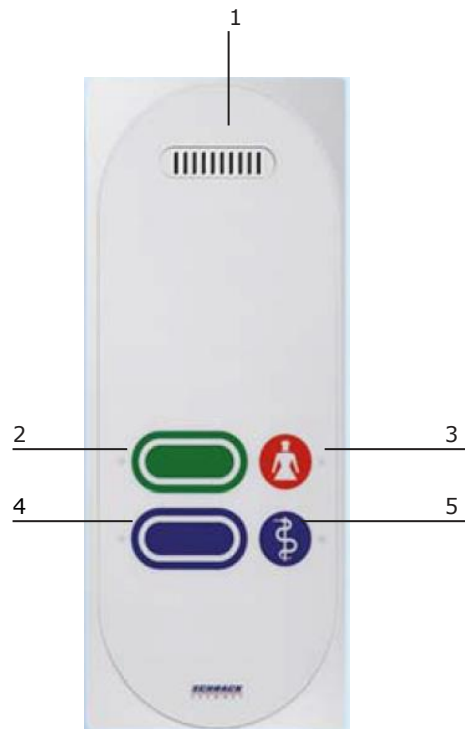

1. Skaņas signāls
2. Māsas klātbūtnes/apstiprinājuma poga
3. Māsas izsaukuma poga
4. Ārsta klātbūtnes/apstiprinājuma poga
5. Ārsta izsaukuma poga

Klātbūtnes atzīmēšana

Nospiežiet savu attiecīgo klātbūtnes taustiņu uz sakaru termināla ieejot telpā. Kontroles gaismas diode pie pogas iedegas, kad poga ir ieslēgta. Iedegas arī attiecīgās krāsas lampa koridorā.

Klātbūtnes atcelšana

Nospiediet iepriekš nospiesto klātbūtnes pogu vēlreiz, kad pametat telpu.

Palīdzības izsaukšana

Lai pacients izsauktu māsas palīdzību, jānospiež sarkanā poga uz pults. Nospiežot pogu, iedegās sarkana indikatora lampiņa blakus pogai.

Izsaukuma apstiprināšana

Māsai ierodoties attiecīgajā telpā jānospiež zaļā poga, lai apstiprinātu savu klātbūtni. Nospiežot pogu, iedegās zaļa indikatora lampiņa blakus pogai.

Māsai nepieciešama palīdzība

Ja tomēr māsai ir vajadzīga papildus palīdzība, izsaukuma apstiprināšanas vietā jānospiež sarkanā poga. Zaļā lampiņa spīdēs un sarkanā lampiņa sāks mirgot.

Piezīmes

Klātbūtnes taustiņu izmanto arī zvanu atcelšanai, gatavojoties ārkārtas zvaniem, ārstu izsaukumiem, kā arī zvanu pāradresācijai un vaicājumiem, kā arī kā atgādinājumiem. Tas ir ļoti svarīgi aprūpei un procedūrām, tāpēc vienmēr ieejot telpā un atstājot telpu, ir jālieto klātbūtnes taustiņu.

Palīdzības izsaukums no tualetes

Izsaukuma poga ar striķīti



Lai izsauktu medicīnas personālu, jāparauj striķītis. Izdarot izsaukumu, virs striķīša iedegās sarkana indikatora lampiņa. Un gaitenī spīdēs balta un sarkana lampa. Lai apstiprinātu izsaukumu, jānospiež zaļā māsas klātbūtnes poga. Ieslēgsies zaļā lampiņa. Pametot telpu jānospiež zaļā poga lai izdzistu zaļā lampiņa.

Izsaukuma poga ar apstiprinājumu



Lai izsauktu māsas, jānospiež sarkanā poga. Nospiežot pogu, iedegās sarkana indikatora lampiņa blakus pogai. Lai apstiprinātu izsaukumu jānospiež zaļā poga. Nospiežot pogu, iedegās zaļa indikatora lampiņa blakus pogai. Māsa tādējādi apstiprina savu klātbūtni. Pametot telpu atkārtoti jānospiež zaļā poga. Nospiežot atkārtoti zaļo pogu zaļā indikatora lampiņa izdziest. Ja tomēr ir vajadzīga papildus palīdzība, jānospiež sarkanā poga. Sarkanā lampiņa sāks mirgot.

Izsaukuma poga



Lai izsauktu māsas, jānospiež sarkanā poga. Nospiežot pogu, iedegās sarkana indikatora lampiņa blakus pogai. Un gaitenī spīdēs balta un sarkana lampa. Lai apstiprinātu izsaukumu, jānospiež zaļā māsas klātbūtnes poga. Ieslēgsies zaļā lampiņa. Pametot telpu jānospiež zaļā poga lai izdzistu zaļā lampiņa.