




**VISOCALL IP.
Savienojuma modulis SM1-B/SM2-B.**

Lietotāja rokasgrāmata.


HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Savienojuma modulis SM1-B.

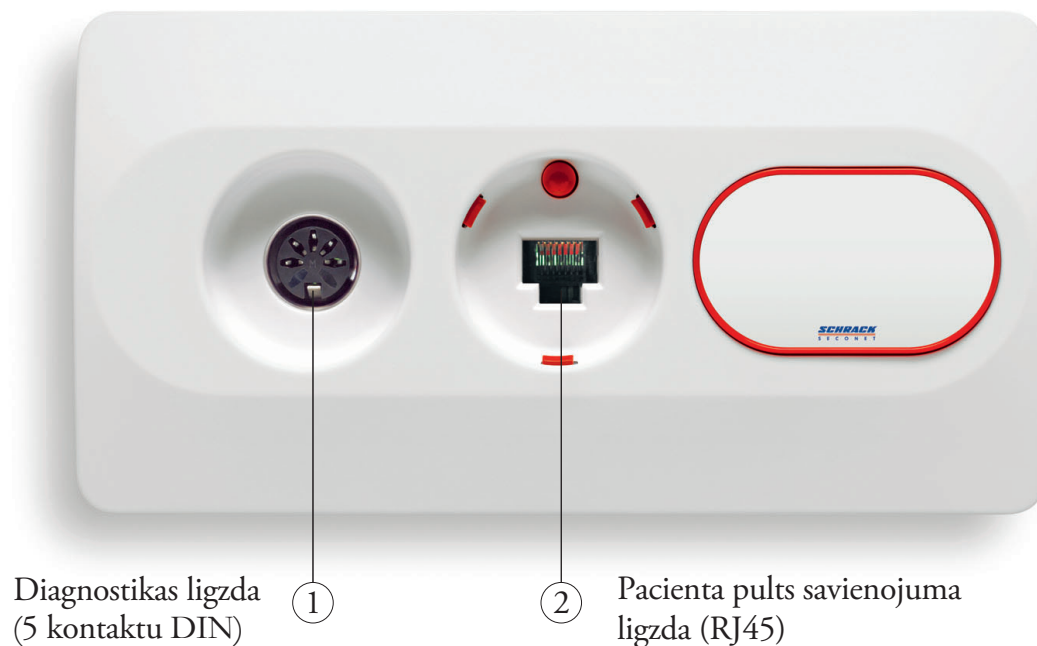

Savienojuma modulis SM2-B.

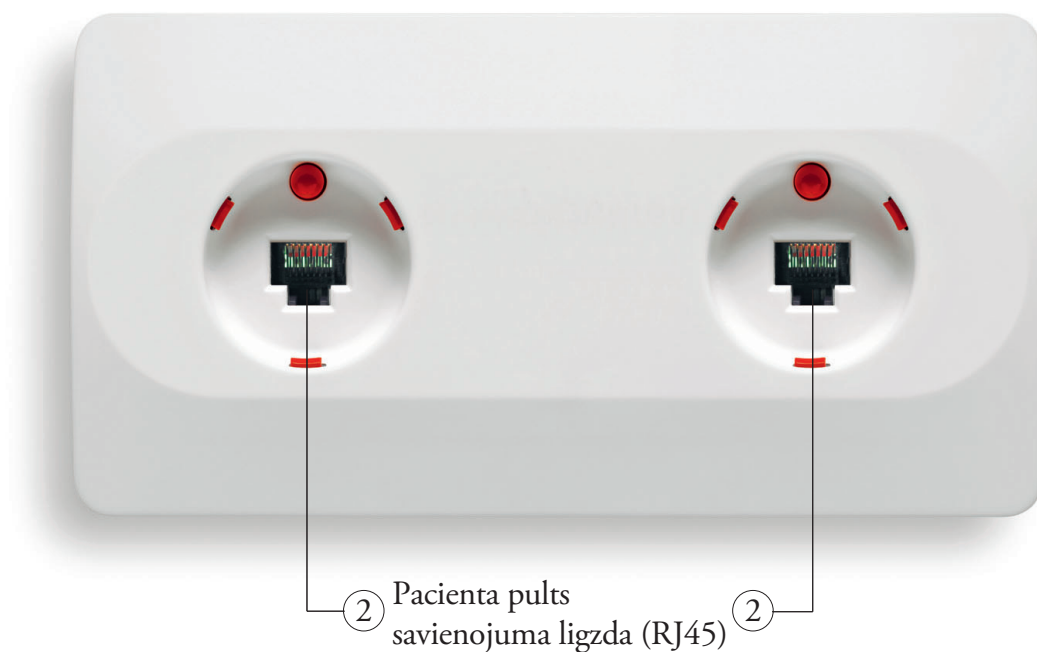

BRĪDINĀJUMS: Katru reizi pēc ierīces kontaktdakšas iespraušanas kontaktligzdā jāpārbauda, vai ierīce darbojas bez jebkādiem traucējumiem un ir iestatīts atslēgšanās signāls. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atslēgšanās signāls automātiski nostrādā katru reizi, kad ierīce ir atvienota no elektroapgādes tīkla!

Diagnostikas ligzda (1)

Diagnostikas ligzda, 5 kontaktu DIN ligzda, tiek izmantota, lai savienotu medicīnas iekārtu (monitoru, injekcijas pumpi, ...) kura jāatbilst EN60601-1.

Pacienta pults savienojumu ligzda (2)

Šī ligzda ir paredzēta tikai un vienīgi BT-B pacienta pults pievienošanai. Šajā ligzdā nedrīkst pievienot ne dzatoru ne dz līdzīgas ierīces, kā arī aizliegts pievienot cita tipa pacienta pultis PAT / PAT-E / PAT-L vai BT-IP. Šai pacienta pultij ir paš-atvienojošs savienojums. Izraujot pacienta pulti netiek bojāti savienojumi (skatīt zemāk esošo zīmējumu).

Paš-atvienojoša ligzda



Iekārtu savienojumi ir izstrādāti tā, ka pat ja kabelis tiks izrauts nepareizi, tad savienojums tiks atvienots no ligzdas, neskatoties uz tā pozīciju (skatīt zemāk). Tas pasargā kabeli, pults savienojumu un ligzdu no saplīšanas. Notiks pults atvienošanas trauksme. Pulti var savienot atpakaļ ligzdā, jebkurā brīdī.

Tīrīšana un dezinfekcija

Savienojuma modulis SM1-B un SM2-B tīrīšanai un dezinfekcijai drīkst izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus, kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ne ketonus, ne dz esterus. Dezinfekcija jāveic, ierīci noslaukot, un aizliegts to iegremdēt dezinfekcijas līdzeklī.

Ekspluatācija un tehniskā apkop

Izsaukumu sistēmas VISOCALL IP ekspluatācijai ir piemērojami standarta DIN VDE0834 9. panta 1. daļas noteikumi. Tādēļ mēs vēlamies izmantot šo iespēju atgādināt, ka minētais standarta pants cita starpā paredz periodiskās apskates un tehniskās apkopes, ko mēs labprāt veiksīm Jūsu uzdevumā.





SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18

A-1120 Vienna

Tel. +43 1 81157

office@schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com

LV

Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422

Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300

India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501

Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel. +48 22 3300620

Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316

Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015

Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595

Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860

Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET