

1 Jūsu drošībai

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Jebkura rīcība ar medicīnas barošanas bloku prasa precīzas zināšanas un izvērtējumu, vadoties pēc šīs lietošanas instrukcijas.

Jūsu TRILUX sienas konsole ir aprīkota ar nepieciešamajām funkcionālajām apgaismojuma, elektriskajām, komunikācijas tehnoloģiju un medicīnas gāzu komponentēm un izveidota atbilstoši Jūsu telpām. Atkarībā no Jūsu medicīnas bloka aprīkojuma var tikt uzstādītas papildus ierīces. Šo papildus ierīču lietošanas instrukcijas ir jāpiemēro attiecīgi un tās ir jāsaņem no attiecīgā ražotāja.

Ja iekārta ir savienota ar ierīci, kura nav saskaņā ar spēkā esošajiem apbūves noteikumiem attiecībā uz publiskajām telpām, ko lieto medicīnas vajadzībām, ja netiek lietota tam paredzētajiem mērķiem, netiek pareizi uzglabāta vai remontēta, vai ja izmaiņas tiek veiktas bez mūsu piekrišanas, atbildība par drošību, izturību un darbību pāriet uz īpašnieku.

2 TRILUX sienas konsole un prasības attiecībā uz iekšējās instalācijas sistēmas pieslēgumu

TRILUX sienas konsoles ir izstrādāta saskaņā ar DIN/VDE 0107 1 un 2 klasi, un guļamtelpās, intensīvās aprūpes zālēs un pamošanās telpās tās ir ar visu nepieciešamo elektrisko, komunikāciju un medicīnisko gāzu tehnisko nodrošinājumu. Atkarībā no režīma TRILUX uzstādīšanas sistēma ir aprīkota ar medicīnas sliedi, lai turētu pārvietojamās medicīniskās iekārtas. Visi ar drošību saistītie pasākumi ir vērsti uz TRILUX instalācijas sistēmu šajās telpās.

Lietošanas ierobežojumi:

Jebkuras izmaiņas medicīnas barošanas blokā, jo īpaši attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes tehnoloģiju sistēmām, nepieciešams nodrošināt ar jaunu atbilstības novērtēšanas procedūru un riska analīzes sagatavošanu.

Strāvas rozetes vai pastāvīgi uzstādītas elektriskās iekārtas, kas nav paredzētas pieslēgt medicīnas barošanas blokam, nedrīkst būt savienotas ar to drošības apsvērumu dēļ.

Izmaiņas var tikt veiktas vienojoties tikai ar TRILUX un izmantojot tikai oriģinālās TRILUX detaļas.