



Iezemētas rozetes
Potenciālu izlīdzināšanas
bultskrūves

Iezemētās ligzdas ir marķētas ar dažādām krāsām: baltā iezīmētas kontaktligzdas, kas jāsavieno ar vispārējo barošanas bloku, zaļā iezīmētas kontaktligzdas drošai strāvas apgādei SV un oranžā iezemētas ligzdas ir paredzētas drošai strāvas apgādei SV ar tīkla laika slēdzi līdz 0.5 sekundēm vai papildus drošības strāvas piegādi ZSV.

Iezemētās ligzdas parasti ir nodrošinātas caur ārējo kabeļu drošības slēdzi (maks. 16) pie dažādas jaudas ķēdēm.

Informējiet sevi, izmantojot slēgtos komutatoru plānus, kuri no Jūsu iekārtas iezemētajām kontaktligzdām sadalās kopīgā ķēdē. Defekta gadījumā vienā no iezemētajām kontaktligzdām, ir iespējams pārslēgties uz citu iezemētai strāvas kontaktligzdas ķēdi.

Uzmanību: Kontaktligzdas bez marķējuma nevar tikt izmantotas, lai savienotu elektriskās iekārtas pacienta vitālo funkciju nodrošināšanai.

Iekārta ir aprīkota ar vismaz vienu zemējuma skrūvi. Pirms Jūs pieslēdzat elektrisko medicīnisko ierīci pie sava medicīniskā bloka, pārbaudiet instrukcijās, vai ierīcei ir nepieciešams zemējums.

Vispārējais, lasīšanas-/ izmeklējuma, un novērošanas apgaismojums parasti tiek nodrošināts caur ārējā kabeļa drošības slēdzi pie dažādām ķēdēm ar maksimāli 16 A.